

CAPA PROTETORA

REGISTRO ANVISA: 80251140047

COMPOSIÇÃO

AS CAPAS PROTETORAS SÃO INVÓLUCROS FABRICADOS COM MATERIAL PLÁSTICO VIRGEM ATÓXICO - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD), FITA AZUL EM PEAD E ELÁSTICOS DE BORRACHA NATURAL. SÃO UTILIZADAS COMO PROTEÇÃO EM EQUIPAMENTOS, CABOS E PAINÉIS DE APARELHOS MÉDICOS. O PRODUTO CONTÉM LATEX NATURAL, PODENDO CAUSAR ALERGIA.

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DO SACO: 80 X 110CM OU 80 X 120CM
ESPESSURA DO SACO: 0,07MM
TAMANHO FITA: 4 X 1,30CM
TAMANHO ELÁSTICO DE BORRACHA NATURAL: NÚMERO 18

VALIDADE

24 MESES APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO.

MODELOS

PRODUTO DE BAIXO RISCO E DE USO ÚNICO - DESCARTÁVEL APÓS SEU USO. AS CAPAS PROTETORAS SÃO ENCONTRADAS EM DIVERSOS MODELOS DE MODO A ATENDER DIFERENTES NECESSIDADES.

S0085 - Capa Protetora para Equipamentos 80 x 110cm
S0086 - Capa Protetora para Equipamentos 80 x 120cm

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO

O PRODUTO TEM PROPÓSITO DE FUNCIONAR COMO PROTEÇÃO ESTÉRIL EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUANDO A TÉCNICA PREVÊ O USO DE PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CABOS E PANÉIS ELETRÔNICOS.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ O PRODUTO CONTÉM LÁTEX NATURAL. PODE CAUSAR ALERGIA.
- ✓ FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO;
- ✓ O PRODUTO É ESTERILIZADO EM SUA EMBALAGEM FINAL, QUE DEVE SER MANUSEADA COM CUIDADO DE MODO A NÃO PROVOCAR DOBRAS E PERFURAÇÕES. A VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DEVE SER SEMPRE OBSERVADA NA EMBALAGEM. A ESTERILIZAÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE ATRAVÉS ÓXIDO DE ETILENO - ETO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À AMERICAN INSTRUMENTS;
- ✓ APÓS A SUA UTILIZAÇÃO, ESTE PRODUTO PODE CONSTITUIR UM RISCO BIOLÓGICO. O DESCARTE DO PRODUTO DEVERÁ SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL EM VIGOR, RESPEITANDO SEMPRE AS RECOMENDAÇÕES FEITAS PARA TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PELO ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL LOCAL;
- ✓ A EMBALAGEM DEVERÁ SER ABERTA APENAS NO MOMENTO DO USO, MANTENDO TÉCNICAS DE ASSEPSIA DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO.



FICHA TÉCNICA

EFEITOS ADVERSOS

NÃO SÃO RELATADOS EFEITOS ADVERSOS AO USO DESTE PRODUTO. USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

MANTER O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, INCLUSIVE DURANTE SUA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE, EVITANDO EXPOSIÇÃO AO SOL, POEIRA, UMIDADE E TEMPERATURA ELEVADA.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O PRODUTO APRESENTA-SE EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SEU USO.

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ ABRIR A EMBALAGEM PELO LOCAL INDICADO, E REMOVER A CAPA E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, TENDO O CUIDADO PARA NÃO CONTAMINAR PARTES DO PRODUTO;
- ✓ POSICIONAR A CAPA SOBRE O APARELHO A SER PROTEGIDO;
- ✓ ENCAPAR O EQUIPAMENTO, CABOS OU PAINÉIS ATÉ SUA ABERTURA TOTAL;
- ✓ FIXAR A CAPA COM AUXÍLIO DA FITA E ELÁSTICOS;
- ✓ RETIRAR A CAPA JUNTAMENTE COM OS ACESSÓRIOS;
- ✓ DESCARTAR PRODUTO APÓS O USO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

FABRICANTE

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 53, 1227 – JARDIM KENNEDY
CEP: 13501-530 – RIO CLARO/ SP
FONE: (19)3531-5100. FAX (19)3531-5109.
CNPJ 06.981.398/0001-21. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO K956X0779300
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899