


## INSTRUÇÕES DE USO

---

**Fabricado por:**  
**Ackermann Instrumente GmbH**  
Eisenbahnstrabe 65-67  
Alemanha

**Importado e Distribuído no Brasil por:**  
**Minas Import Ltda.**  
Av. Mem de Sa, 819 – Santa Efigênia.  
Belo Horizonte – MG – CEP: 30260-270.  
CNPJ: 00.279.767/0001-00  
Farm. Resp: Thalyta Coaglio Coelho e Silva  
CRF- MG: 15.162  
Registro ANVISA nº: 80302210015

### EUROCLIP GRAMPOS HEMOSTÁTICOS

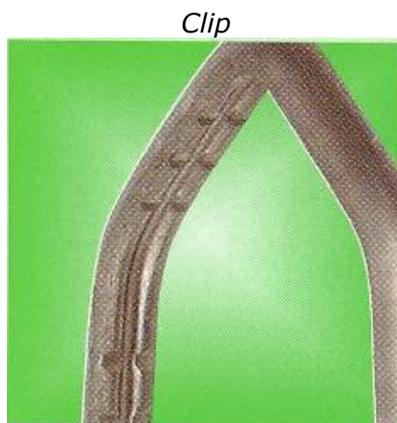

### DESCRIÇÃO

Os Grampos Hemostáticos Euroclip são dispositivos em titânio em forma de cone, de 16 mm de largura e diâmetro de 8 mm. Uma face do grampo possui uma fenda que permite a introdução de um instrumento cirúrgico apropriado para a abertura do grampo. Na face oposta à fenda retangular o grampo possui uma fenda serrilhada por toda a sua extensão que permite a abertura das bordas quando se utiliza o aplicador de grampos. Ele envolve as bordas da incisão e promove a hemostasia por compressão mecânica, evitando-se assim (ou pelo menos diminuindo acentuadamente) a utilização de eletrocoagulação.

### INDICAÇÕES

Os Grampos Hemostáticos Euroclip são indicados nos procedimentos cirúrgicos para a oclusão de vasos, pois possui forma em cone que engloba o vaso a ser ocluído.

O designer da superfície interna do grampo garante excelente posicionamento do grampo no vaso, pois este grampo pode ser utilizado em técnicas cirúrgicas que requeiram hemostasia ou marcador radiográfico.

## MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- ✓ **Grampos:** produzidos em Titânio.
- ✓ **Estojo:** produzidos em co-polímero acetal.

## MODELOS E DESCRIÇÕES

Cores	Código	Tamanho do Grampo	Grampos/ Cartucho	Cartucho/ Caixa	Grampos/ Caixa
Laranja 	AI74CL6	Grande	06	20	120
Verde 	AI74CML6	Médio-Grande	06	20	120
Azul 	AI74CM6	Médio	06	20	120
Amarelo 	AI74CS6	Pequeno	06	20	120

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Escolha o aplicador de grampo adequado ao tamanho do grampo a ser utilizado.
2. Segure o aplicador de grampo na linha de junção entre os dois braços.
3. Segure o cartucho do grampo de forma estável e insira as mandíbulas das pinças verticalmente no cartucho de grampo.
4. Pressione para baixo até que o grampo esteja totalmente encaixado nas mandíbulas do aplicador.
5. Coloque as mandíbulas do instrumento ao redor da parte a ser ligada.
6. Pressione os dois braços bem apertados até que atinjam a posição final.
7. Primeiro a parte distal do grampo irá fechar, englobando o tecido a ser ligado e então o grampo fechará em direção à extremidade da espinha de peixe, até estar totalmente fechado.
8. Libere a pressão nos dois braços e retire o aplicador.



**ATENÇÃO!**

**OS GRAMPÓS PERMANECEM ESTÉREIS POR 05 ANOS, DESDE QUE ESTEJAM EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL.**

**QUANDO IMPLANTADOS, PODEM PERMANECER NO ORGANISMO POR UM PERÍODO INDETERMINADO, OU SEJA, PARA SEMPRE.**

## **PRECAUÇÕES DE USO**

### **Colocação do grampo no aplicador:**

1. Use a pinça recomendada.
2. Verifique a pinça e mandíbulas antes do uso.
3. Nunca segure o aplicador pelos dois anéis ou seus dois braços ao colocar o grampo nas mandíbulas do aplicador; isto pode causar fechamento precoce do grampo ou posicionamento ruim do grampo no aplicador.

### **Para evitar danificar as mandíbulas da pinça:**

1. Nunca insira as mandíbulas da pinça de maneira oblíqua no cartucho do grampo.

### **Ligadura:**

1. Não aperte os braços do aplicador antes das mandíbulas estarem totalmente ao redor do tecido arterial ou venoso a ser ligado.
2. Pressione os dois braços juntos até que atinjam o ponto final a fim de garantir fechamento apropriado do grampo.
3. Inspeccione a ligadura para verificar a qualidade da aplicação e hemostasia.

### **AVISO:**

Não reesterilize.

Não use se a embalagem tiver sido aberta ou danificada. Destrua após o uso.

### **IMPORTANTE**

O produto pode somente ser utilizado por um médico ou sob a supervisão deste.



Descartável



Data de Validade: ano e mês



Produto estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.  
Método de esterilização: óxido de etileno



Marca CE e número de registro. Produto de acordo com os requerimentos essenciais da Diretriz Européia 93/42/EEC para

-  Equipamentos Médicos
-  Número do lote
-  Leia as instruções de uso cuidadosamente
-  Armazenar em local seco

## **ARMAZENAMENTO**

Armazenar em temperatura ambiente, protegido de calor e umidade, em sua embalagem original.

- ✓ **PRODUTO MÉDICO-HOSPITALAR.**
- ✓ **ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.**
- ✓ **USO ÚNICO. NÃO REUTILIZÁVEL. DESTRUIR APÓS O USO.**
- ✓ **Não utilizar caso a embalagem esteja previamente aberta ou danificada.**
- ✓ **Antes de utilizar o produto, ler atentamente as instruções de uso que acompanham o mesmo.**

## **APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

Os grampos são embalados em cartuchos de polietileno e Tyvek contendo 06 unidades. Estas embalagens são acondicionadas em caixas contendo 20 cartuchos, totalizando 120 grampos por caixa.

\_\_\_\_\_  
Thalyta C. Coelho e Silva  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Thalyta C. Coelho e Silva  
Responsável Técnica  
CRF- MG:15.162