

ENDO FOG

REGISTRO ANVISA: 80251140004

COMPOSIÇÃO

FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 10mL DE SOLUÇÃO (ÁGUA, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO) E UMA ESPONJA DE POLIURETANO.

VALIDADE

36 MESES APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO.

MODELOS

AI0030

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO

ENDO FOG É UMA SOLUÇÃO AQUOSA, SEM COLORAÇÃO E ESTÉRIL, CUJA FINALIDADE É A DE MINIMIZAR O EMBAÇAMENTO E REDUZIR A ESTÁTICA DAS LENTES DE ÓTICAS DURANTE PROCEDIMENTOS DE VIDEOCIRURGIAS. O PRODUTO POSSUI FORMULAÇÃO SEGURA, PORTANTO NÃO DANIFICA AS LENTES DE ÓTICAS DURANTE PROCEDIMENTOS DE VIDEOCIRURGIAS. O PRODUTO POSSUI FORMULAÇÃO SEGURA, PORTANTO NÃO DANIFICA AS LENTES COM AS QUAIS ENTRA EM CONTATO. PERMITE IMAGENS MAIS NÍTIDAS E CLARAS POR UM PERÍODO DE TEMPO MAIS LONGO. SECA RAPIDAMENTE APÓS A APLICAÇÃO, PERMITINDO UMA VISÃO MAIS CLARA E OBJETIVA DO CAMPO OPERATÓRIO.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ PRODUTO DE USO EXTERNO.
- ✓ OBSERVAR ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO.
- ✓ NÃO APLICAR O PRODUTO PRÓXIMO AOS OLHOS, POIS O ÁLCOOL ISOPROPÍLICO É UM IRRITANTE OCULAR MODERADO. CASO HAJA CONTATO COM OS OLHOS, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE DURANTE 15 MINUTOS, E PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
- ✓ EVITAR CONTATO COM A PELE.
- ✓ NÃO UTILIZAR O PRODUTO CASO SUA EMBALAGEM ORIGINAL APRESENTE SINAIS DE VIOLAÇÃO OU DATA DE VALIDADE EXPIRADA.
- ✓ ABRIR A EMBALAGEM SOMENTE NO MOMENTO DO USO.
- ✓ PRODUTO ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. ESTERILIDADE ASSEGURADA ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR VIOLADA.
- ✓ PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO EM LOCAL APROPRIADO.

EFEITOS ADVERSOS

NÃO SÃO RELATADOS EFEITOS ADVERSOS AO USO DESTE PRODUTO. USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

MANTER O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, INCLUSIVE DURANTE SUA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE, EVITANDO EXPOSIÇÃO AO SOL, POEIRA, UMIDADE E TEMPERATURA ELEVADA.

COMO RECOMENDAÇÃO GERAL É ESPECIFICADO MANTER-SE ENTRE 5°C e 30°C E ENTRE 40% a 75% DE UMIDADE RELATIVA.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O PRODUTO É ENVAZADO EM FRASCOS CONTENDO 10mL DE SOLUÇÃO E UMA ESPONJA DE POLIURETANO AUTOCOLANTE 5CM X 5CM. EM SEGUIDA, INSERIDO EM UMA EMBALAGEM PLÁSTICA PRIMÁRIA UNITÁRIA DESTINADA AO ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS TIPO BLISTER PRODUZIDO DE MATERIAL PLÁSTICO (Polietileno Tereftalato – PET) E SELADO COM PAPEL TYVEK.

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ ABRIR A EMBALAGEM UTILIZANDO TÉCNICAS USUAIS DE ASSEPSIA;
- ✓ MOLHAR A SUPERFÍCIE DA LENTE E DEIXA-LA SECAR;
- ✓ DURANTE O PROCEDIMENTO, COLOCAR ESPUMA AUTO-ADESIVA PRÓXIMA AO FRASCO;
- ✓ SEMPRE QUE NECESSÁRIO, MOLHAR A LENTE DA ÓTICA NA ESPONJA UMEDECIDA;
- ✓ DESCARTAR APÓS O USO.

FABRICANTE

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 53, 1227 – JARDIM KENNEDY
CEP: 13501-530 – RIO CLARO/ SP
FONE: (19)3531-5100. FAX (19)3531-5109.
CNPJ 06.981.398/0001-21. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO K956X0779300
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899